


## Pokyny pro odběr, zpracování a transport moči

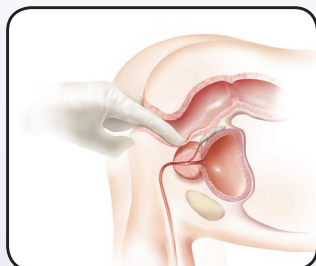

**1.**  
**DRE**  
**3 TAHY PO KAŽDÉM LALOKU**



**2.**  
**VZOREK Z PRVNÍHO**  
**PROUDU MOČI**  
**(20 - 30 ml)**



**3.**  
**PŘENESTE MOČ**  
**DO TRANSPORTNÍ ZKUMAVKY**

**Postupujte podle níže uvedených instrukcí.**

Pacient před vyšetřením vypije větší množství vody (cca 500ml).

Těsně před odběrem moči proveďte vyšetření prostaty per rectum. **Každý lalok prostaty zmáčknete do hloubky 1 cm směrem od báze k apexu, ze strany do středu.** Tlak u každého laloku opakujte 3x. Účelem není provedení masáže prostaty.

Po vyšetření per rectum zachyťte do kelímku na sběr moči (bez konzervačních činidel) **20-30 ml z prvního proudu moči.** Pokud pacient vymočí více než požadovaných 20-30 ml, ponechte celý tento objem. Pro provedení testu PROGENSA PCA3 je nutný minimální objem moči 2,5 ml.

Při manipulaci se vzorky moči a činidly soupravy používejte **jednorázové rukavice bez talku.**

**Vzorky od různých pacientů zpracovávejte postupně, je nutné zabránit vzájemné kontaminaci vzorků.**

Uzavřený **kelímek na sběr moči 5x překlopte** a do přepravní zkumavky PROGENSA PCA3 přeneste přiloženou jednorázovou pipetou 2,5 ml odebrané moči. Správný objem moči byl přidán, je-li její hladina mezi dvěma černými ryskami na štítku přepravní zkumavky.

**Přepravní zkumavku PROGENSA PCA3 těsně uzavřete a opět 5x překlopte,** aby se vzorek dobře ve zkumavce promíchal.

Vzorky moči v přepravních zkumavkách PROGENSA PCA3 musí být **doručeny do laboratoře do pěti dnů od odběru** – skladování a transport při teplotě do 30°C.

Více informací:

**www.pca3.org**

CITYLAB spol. s r.o., Čílova 303/10, 162 00 Praha, tel.: 235312263, citylab@citylab.cz